


# CERTUS OVERFLATEDESINFEKSJON 85 %

FD106, FD110, FD105, FD401

# CERTUS

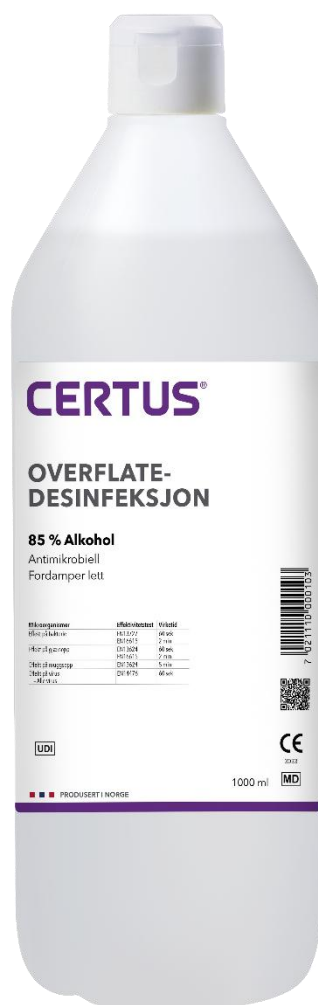

## Produktbeskrivelse

CERTUS Overflatedesinfeksjon 85 % har dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og mugg- og gjærsopp. Dette er et effektivt antimikrobielt produkt beregnet for generelle overflater og overflater til ikke-invasivt medisinsk utstyr.

## Dosering (BPR og MDR):

Påføres rikelig på overflaten og fordeles ut med ren klut/svamp. Påfør nok til at overflaten holdes synlig fuktig i angitt virketid (se tabell). La lufttørke etterpå. Ikke bruk før flaten er helt tørr. Overflaten trenger ingen etterbehandling og produktet etterlater ingen rester.

Hansker skal brukes når produktet brukes. Nitril, Neopren, Viton eller PVC hansker som oppfyller standard EN374 anbefales.

Begrens innånding fra avdamping ved eventuelt søl av større mengder under bruk. Søk frisk luft dersom ubehag oppstår.

**Flasken skal ikke etterfylles.**

Mikroorganismer	Effektivitetstest	Virketid
Effekt på bakterie	EN13727 EN16615	60 sek 2 min
Effekt på gjærsopp	EN13624 EN16615	60 sek 2 min
Effekt på muggsopp	EN13624	5 min
Effekt på virus - Alle virus	EN14476	60 sek

**Bruk (BPR):** Overflatedesinfeksjon PT2 til synlig rene, glatte, harde, ikke-porøse overflater som tåler alkohol. Til privat og profesjonell bruk.

**Bruk (MDR):** Overflatedesinfeksjon til synlig rene, glatte, harde, ikke-porøse overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol. Til bruk av profesjonelt helsepersonell.

**Ved alvorlige hendelser, rapporter til produsenten og nasjonale myndigheter**

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.**

**Sikkerhetsdatablad:** [EcoOnline AS](#)

**UFI: 2R7J-WQ8Y-UEAG-WNUM**

## Tekniske data

- Utseende / Farge Klar væske
- Tetthet kg/l ved 20 °C ~ 0,84
- Flammepunkt °C ~ 12 °C
- Holdbarhet 3 år
- Lagringsbetingelser -18°C til +30°C

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- 85 % Alkohol
- Antimikrobiell
- Norskprodusert
- Dokumentert effekt
- CE-merket

## Sortiment

Varenummer	Størrelse
FD106	250ML
FD110	720ML
FD105	1000ML
FD401	4L

## Vareinformasjon

Varenr.	F-Pak	Antall
FD106	7021110000110	Ant per D-pak 12 Antall per T-pak 1260 Antall D-pak per T-pak 105
FD110	7021110000127	Ant per D-pak 12 Antall per T-pak 624 Antall D-pak per T-pak 52
FD105	7021110000103	Ant per D-pak 12 Antall per T-pak 480 Antall D-pak per T-pak 40
FD401	7021110000189	Ant per D-pak 3 Antall per T-pak 144 Antall D-pak per T-pak 48